


## INSTRUCCIONES DE USO

Lea las instrucciones antes de recolectar la muestra

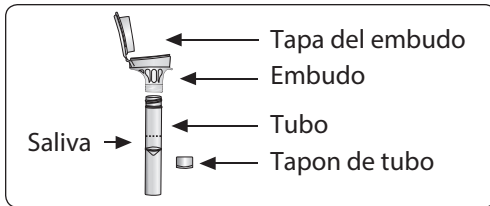

### Precaucion para Recoleccion:

**No coma, beba, fume, o mastique goma de mascar 30 minutos antes de entregar su muestra de saliva.**

**No remueva el film de plastico del embudo.**

**Indicacion de Uso:** Para la colleccion de ADN humano a traves de la muestra de saliva.

**Contenido:** El kit contiene una solucion estabilizante.

**Precaucion y Advertencias:** Lave sus manos con agua. Enjuague con agua si el liquido estabilizante toma contacto con sus ojos o piel. Este liquido no es para beber. Lea el MSDS en nuestro sitio en [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).






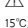
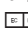


La tapita del tubo puede ocasionar ahogo y es peligroso.

**Almacenar:** 15°C / 30°C

### Resumen y explicacion del kit:


Oragene-DNA es un kit de recoleccion que provee los materiales e instrucciones necesarias para recolectar y estabilizar muestras de saliva para analisis.

### Signos y significado en la etiqueta:


|   |   |
|---|---|
|  | Consulte las instrucciones                    |
|  | Collecte la saliva antes de (Use antes de)    |
|  | Dispositivo medico para diagnostico in vitro  |
|  | Numero de Catalogo                            |
|  | Marca CE                                      |
|  | Precaucion, consulte las instrucciones de uso |
|  | Temperatura de almacenamiento                 |
|  | Representante Autorizado                      |
|  | Fabricante                                    |

### Procedimiento:


**La mayoría de las personas toman entre 2 y 5 minutos para obtener la muestra de saliva como lo demuestran los pasos 1 al 5.**

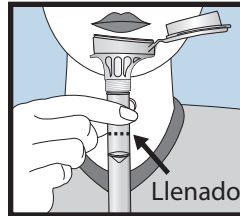


- 1 Escupa saliva dentro del embudo hasta que la cantidad de saliva (sin burbujas) alcance la linea de llenado como lo muestra la figura #1.

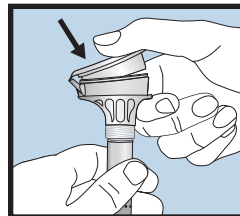


- 2 Mantenga el tubo vertical con una mano. Cierre la tapa del embudo con la otra mano (figura # 2) haciendo presion hasta escuchar el click. El liquido dentro de la tapa sera liberado dentro del tubo para mezclarse con la saliva. Asegurese que la tapa esta cerrada firmemente.

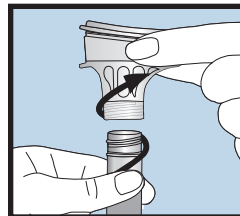

- 3 Mantenga el tubo vertical. Desensrosque el embudo del tubo.

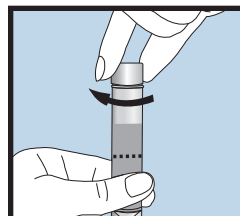

- 4 Use la tapa para tubo, que se encuentra en el kit, y cierre el tubo firmemente.

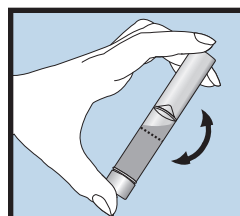

- 5 Sacuda el tubo cerrado por 5 segundos. Descarte el embudo.



**Para uso en Diagnostico in vitro**

**DNAgenotek**



Made in Canada  
DNA Genotek Inc.  
Ottawa, ON, Canada K2K 1L1

*Superior samples*  
*Proven performance*

Tel: 613.723.5757  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, The Netherlands  
Tel: (+31) (0) 70 345-8570 Fax: (+31) (0) 70 346-7299

Australian Sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

Oragene-DNA is not available for sale in the United States.

\*Oragene is a registered trademark of DNA Genotek Inc.

Some DNA Genotek products may not be available in all geographic regions, contact your sales representative for details. All DNA Genotek protocols, white papers and application notes, are available in the support section of our website at [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2014 DNA Genotek Inc., a subsidiary of OraSure Technologies, Inc., all rights reserved.  
PD-PR-118 Issue 3/2014-06